





วิธีการเปรียบเทียบภาพ Dicom จากโปรแกรม iGreen PACs

1. สร้าง Folder ขึ้นมาใหม่ 1 Folder สำหรับจัดเก็บภาพ Dicom ในที่นี้จะสร้างชื่อ Dicom File
2. ทำการ Export ภาพที่ต้องการจะเปรียบเทียบ โดยเข้าไปที่ที่คอนโซล Export >>> Save as DICOMDIR >>> Save

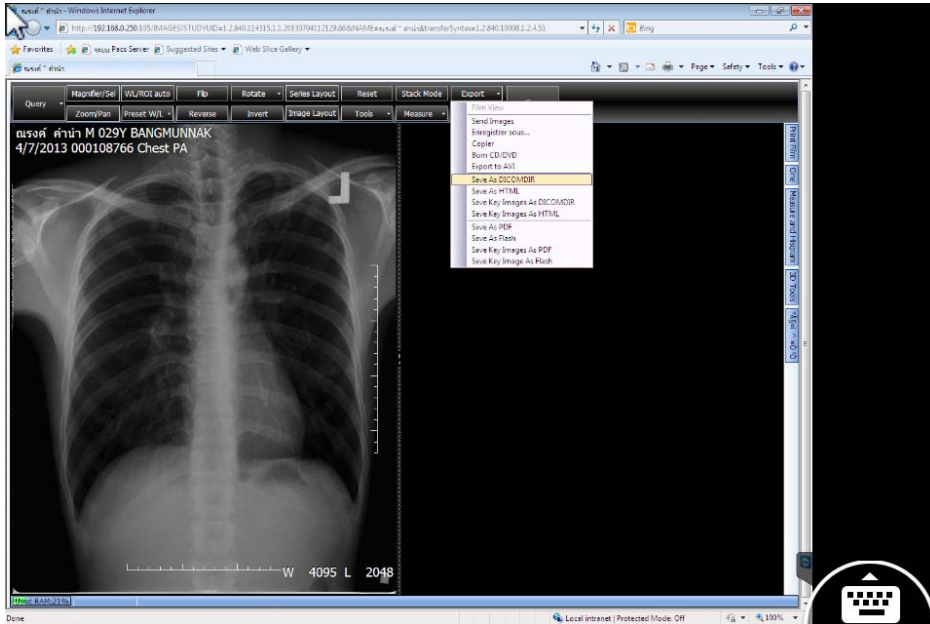


3. ทำการ Import ภาพที่ต้องการจะเปรียบเทียบ เลือก Series Layout ตามจำนวนภาพที่ต้องการเปรียบเทียบ แล้วไปที่ Query >>> Load From Files >>> แล้วเลือกไปที่ Folder ที่เราจัดเก็บภาพไว้ เลือก Files of type เป็น All file แล้วเลือกชื่อไฟล์ที่เราเก็บภาพไว้ ซึ่งชื่อจะเป็นชื่อ File01 ... File02 ... File03 ... File04 ... กดเลือกไฟล์แล้วกด Open

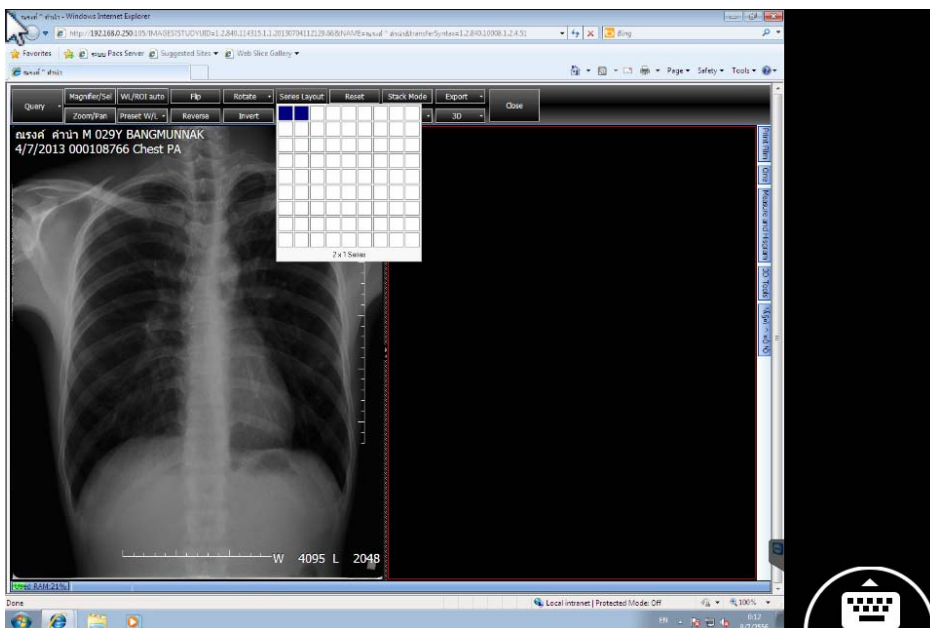

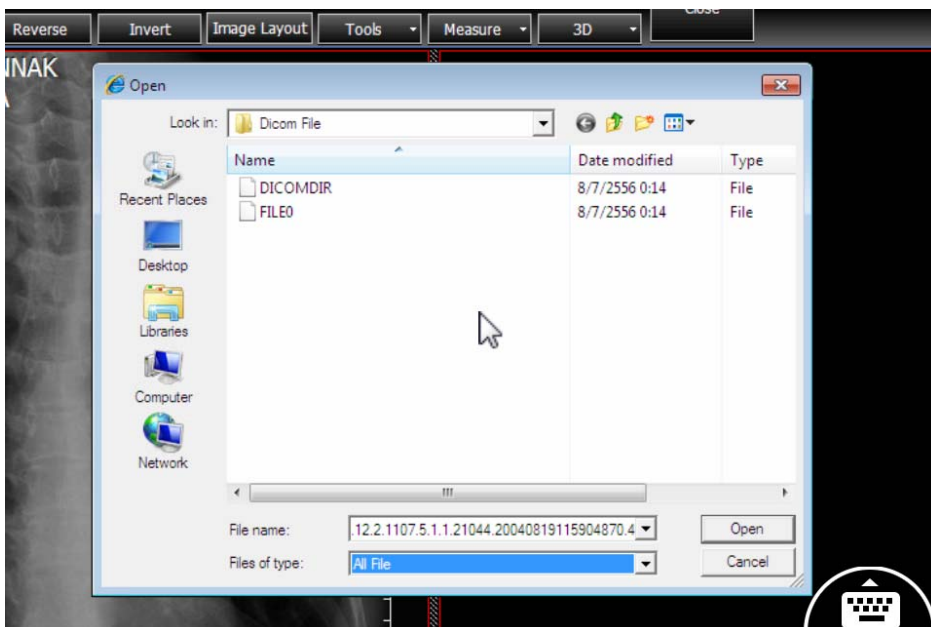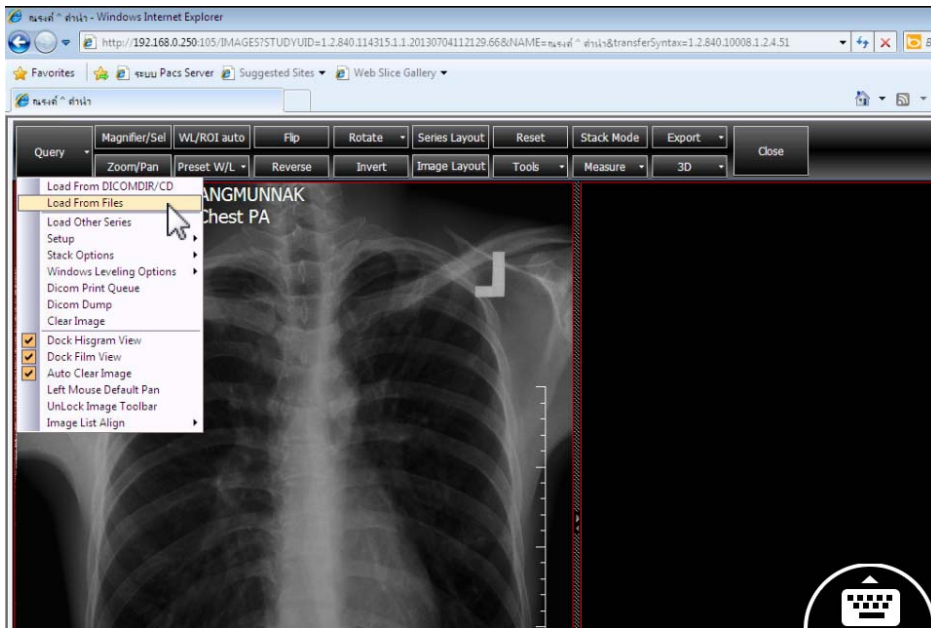

4. จะได้ดั่งภาพ

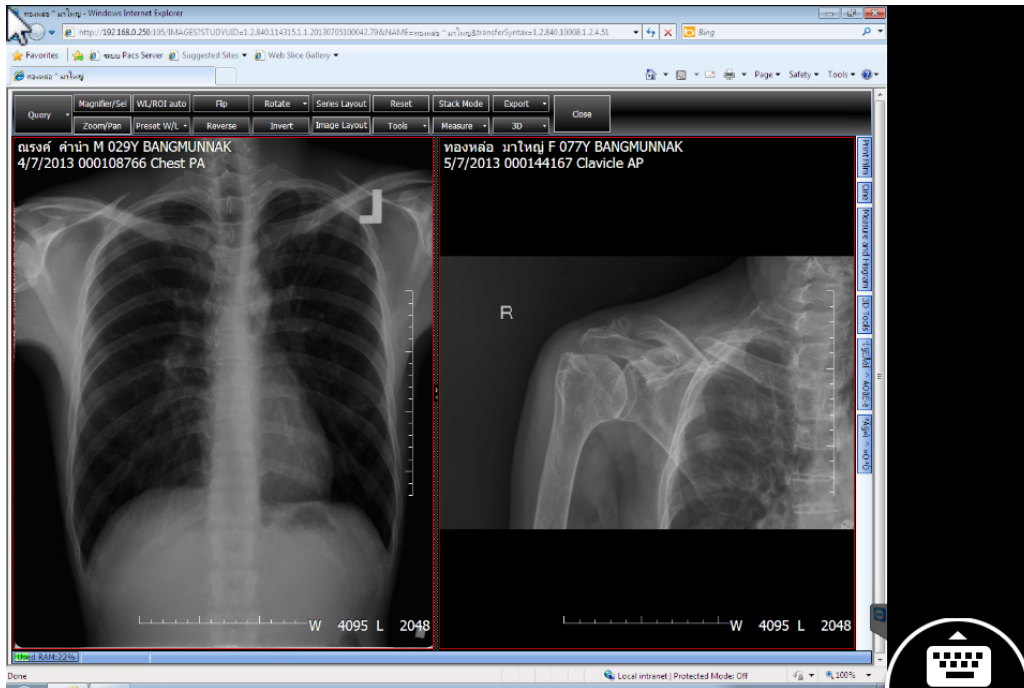

5. หากต้องการเปรียบเทียบภาพมากกว่านี้ ให้เลือกจำนวน Series Layout มากขึ้น แล้วทำวิธีการเดิมไปจนครบ จะได้ตัวอย่างดังภาพ

